





Project: Wortie Wart & Verruca PL	<b>KARO PHARMA</b>
Version: 3 Date: 22-04-2020	
KARO code: 2000476_2 Component type: Leaflet Language: Polish	
Dimensions (H x W x D): 297 x 210 mm Machine drawing ID: - Material: ?	
Print colours:  Process BLACK	
Onlay:  Cut	 Fold
Extra colours:  For Position ONLY	If this supporting colour is present it means the artwork is still in progress and therefore its content and technical specs are not ready for reproduction. When approved or input is available this colour will be replaced by a print colour.

## Skuteczny już po 1 aplikacji!

- Działa szybko i jest łatwy w użyciu
- Nie uszkadza skóry wokół brodawki / kurczaka
- Odpowiedni dla dzieci od 4. roku życia i dorosłych

### Co to jest Wortie i w jakim celu się go stosuje?

Wortie to łatwy w użyciu preparat do zamrażania brodawek i kurczaków, działa podobnie do krioterapii stosowanej przez lekarzy. Brodawki zwykłe (kurczaki) i brodawki stóp są małymi grudkami skórnymi wywołanymi przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

**Brodawki zwykłe** (kurczaki na dłoni) często występują na palcach rąk lub na grzbiecie dłoni, na kolanach i łokciach. Brodawki zwykłe można rozpoznać po szorstkiej, „kalafiorowatej” powierzchni. Wirus powodujący brodawki / kurczaki jest bardzo zakaźny i może przenosić się z jednej osoby na drugą lub z jednej części ciała na inną poprzez bezpośredni kontakt z zakażonym miejscem.

**Brodawki podeszwowe (kurczaki stóp)** są bardzo podobne do brodawek zwykłych, tylko występują na podeszwie stopy lub pod palcami. Zazwyczaj są bolesne, często mają wygląd małego, białego pierścienia skóry z czarnymi kropkami w środku. Brodawki stóp również są zakaźne i mogą przenosić się na inne osoby przez kontakt z mokną powierzchnią, np. podłogą.

### Jaki jest mechanizm działania preparatu Wortie?

Wortie precyzyjnie zamraża brodawkę / kurczakę dzięki unikalnemu i precyzyjnemu aplikatorowi. Zaokrąglony kształt końcówki Wortie umożliwia precyzyjną aplikację niskiej temperatury wyłącznie na brodawkę lub kurczakę, bez oddziaływania na otaczającą zdrową skórę, co sprawia, że aplikacja jest mniej bolesna.



#### Precyzyjna końcówka

- Celowana aplikacja na brodawkę / kurczakę
- Efektywna metoda zamrażania
- Bezpieczeństwo stosowania

Podczas stosowania produktów do krioterapii w celu usunięcia brodawek i kurczaków, kolor leczonego obszaru może przejściowo zmienić się na biały. Po ustąpieniu zamrożenia kolor zmienia się na czerwony. W wyniku procesu zamrażania pod lezoną brodawką / kurczakiem może powstać pęcherz. W ciągu 10 do 14 dni brodawka / kurczak stopniowo zniknie lub odpadnie, odsłaniając zdrową skórę. Jedno zastosowanie preparatu Wortie powinno wystarczyć do skutecznego usunięcia brodawki / kurczaka. Jeśli jednak konieczne będzie powtórzenie aplikacji, to należy wykonać je po 14 dniach od poprzedniego użycia preparatu. W przypadku konieczności usunięcia kilku brodawek, przed kolejną aktywacją metalowa końcówka powinna powrócić do temperatury pokojowej. W niektórych przypadkach, moczenie brodawki w ciepłej wodzie przez kilka minut przed aplikacją preparatu Wortie, może wspomóc przenikanie niskiej temperatury.

### Dlaczego Wortie?

W preparacie Wortie zastosowano opatentowaną technologię zapewniającą szybkie i skuteczne leczenie brodawek i kurczaków.

### Wortie działa szybko

Wortie nie wymaga żadnego montażu, w związku z czym zapewnia szybkie i łatwe leczenie brodawek i kurczaków. Aplikator Wortie jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez konieczności kłopotliwego montażu główek i małych części. Po aktywacji, która trwa zaledwie 3 sekundy, preparat można zastosować na brodawkę / kurczakę.


### Wortie jest bezpieczny

Zaletą unikalnej, opatentowanej metalowej końcówki Wortie jest szybsze leczenie brodawek i kurczaków przy jednoczesnym braku bezpośredniego kontaktu zdrowej skóry z płynnym gazem zawartym w pojemniku. Wortie zamraża za pomocą metalowej końcówki, a siłę zamrażania można regulować poprzez stopień nacisku na brodawkę / kurczakę w trakcie stosowania preparatu. Silniejszy nacisk oznacza kontakt większej powierzchni metalowej końcówki ze zmienioną skórą i zamrożenie większego jej obszaru. Przy lekkim nacisku kontakt jest minimalny, co pozwala na leczenie mniejszych brodawek i kurczaków. Wortie jest odpowiedni dla dzieci od 4. roku życia.


### Wortie jest skuteczny

Porównano siłę zamrażania Wortie z innymi produktami do krioterapii. Jak pokazują poniższe ryciny i wykres\*, żadne inne porównywalne urządzenie do krioterapii nie zamraża równie skutecznie jak Wortie\*.

### Precyzyja zamrażania

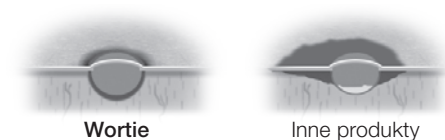


#### \*Efektywność zamrażania

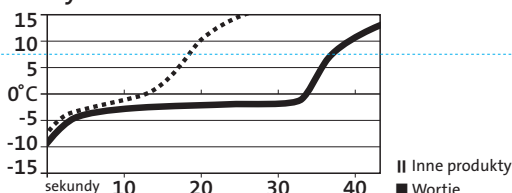

\*Dane zawarte w dokumentacji technicznej wyrobu medycznego.

### Jak należy stosować Wortie?

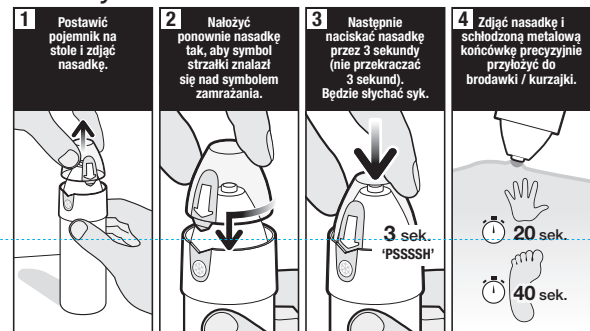

#### Brodawki zwykłe (kurczaki na dłoniach)

1. Postawić pojemnik na stole lub innej równej powierzchni i zdjąć nasadkę.
2. **Trzymając pojemnik w pozycji pionowej;** nałożyć ponownie nasadkę tak, aby symbol strzałki znalazł się nad symbolem zamrażania.
3. Następnie naciskać nasadkę przez 3 sekundy (nie przekraczać 3 sekund). Będzie słychać dźwięk aktywacji (syk).
4. Zdjąć nasadkę i schłodzoną metalową końcówkę precyzyjnie przyłożyć do brodawki na dłoń na 20 sekund.

#### Brodawki podeszwowe (kurczaki na stopach)

1. Postawić pojemnik na stole lub innej równej powierzchni i zdjąć nasadkę.
2. **Trzymając pojemnik w pozycji pionowej;** nałożyć ponownie nasadkę tak, aby symbol strzałki znalazł się nad symbolem zamrażania.
3. Następnie naciskać nasadkę przez 3 sekundy (nie przekraczać 3 sekund). Będzie słychać dźwięk aktywacji (syk).
4. Zdjąć nasadkę i schłodzoną metalową końcówkę precyzyjnie przyłożyć do brodawki podeszwowej na stopie na 40 sekund.

### Środki ostrożności

Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie stosować preparatu Wortie:

- u dzieci poniżej 4. roku życia,
- w obszarze lub w pobliżu twarzy, dołu pachowego, piersi, pośladków ani okolic narządów płciowych,
- w leczeniu znamion wrodzonych, pieprzyków, brodawek, z których wyrastają włosy ani żadnych innych zmian o charakterze plam,
- na obszarach skóry wrażliwej, objętej stanem zapalnym, uszkodzonej, zranionej, otartej, zmienionej chorobowo lub swędzącej,
- w przypadku wątpliwości, czy dana zmiana skórna jest brodawką zwykłą (kurczakiem) lub brodawką stóp, należy skonsultować się z lekarzem.

### Ostrzeżenia

Zawiera małe elementy. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Metalowa końcówka pokryta jest niklem. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać. Tylko do użytku zewnętrznego. Pojemnik pod ciśnieniem, w przypadku ogrzania może wybuchnąć. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni - palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F. Chronić przed światłem słonecznym i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Jeśli Wortie stosowany jest u dzieci, to ze względów bezpieczeństwa zawsze musi go aplikować osoba dorosła. Nie należy naciskać zbyt mocno brodawki / kurczaki. W przypadku kurczaki na dłoń należy aplikować przez maksymalnie 20 sekund, a kurczaki na stopie - przez maksymalnie 40 sekund. W razie potrzeby po każdym użyciu należy oczyścić aplikator szmatką nasączoną alkoholem. Jeśli kilka brodawek / kurczaków położonych jest blisko siebie, należy jednorazowo leczyć tylko jedną z nich.

### Działania niepożądane

- Podobnie jak w przypadku zastosowania innych urządzeń do krioterapii brodawek / kurczaków, skóra może przejściowo zmienić kolor na biały.
- Należy przestrzegać podanego czasu stosowania (20 sekund na dłoń / 40 sekund na stopie), aby uniknąć miejscowego uszkodzenia tkanek.
- Pęcherze powstałe po leczeniu większych lub bardziej uporczywych brodawek / kurczaków mogą być bardziej dolegliwe.
- W miejscu usunięcia brodawki / kurczaka może dojść do odbarwienia skóry lub powstania niewielkiej blizny.
- W wyniku zastosowania preparatów do krioterapii brodawek / kurczaków może dojść do niewielkich oparzeń spowodowanych niską temperaturą zamrażania. W przypadku wystąpienia nasilonych dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

### Skład: Eter dimetylowy

CE 0344

Ostatnia aktualizacja ulotki: Marzec 2020.

Więcej informacji na temat produktu można uzyskać na stronie [www.wortie.pl](http://www.wortie.pl)

**Wytwórca:**  
Trimb Healthcare  
Barbara StrozziIaan 201  
1083 HN Amsterdam  
Niderlandy

**Dystrybutor:**  
**Vitamed**  
Pharmaceuticals  
Vitamed, ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice  
[www.vitamed.pl](http://www.vitamed.pl)  
[www.vitamedlive.pl](http://www.vitamedlive.pl)



2000476\_2  
59-34037-2100